

Neu – die Abdrückhilfe für die Dialyse



- › Verbesserte Hygiene
- › Einfach und individuell dosierbar
- › Hautverträgliches Material
- › In einer praktischen Spenderbox

Einfache Anwendung in 4 Schritten:



Über den Tupper anlegen



Einen leichten Zug aufbauen



Die Pulsation prüfen und befestigen



Das lose Ende einstecken

Der Tupper wird temporär fixiert und der Kompressionsdruck individuell und stufenlos dosiert.

Das hautverträgliche Material schneidet nicht ein.

Durch die Verwendung des Einmalproduktes wird der hohe hygienische Standard gesichert – eine Zuordnung entfällt.

Die praktische Spenderbox macht die Handhabung einfach. Der Zeitaufwand für die Reinigung und Sterilisation entfällt und die Sicherheit steigt für Ihre Patienten.



Wichtig: Bei der Palpation des Gefäßes muss zu jeder Zeit noch die Pulsation des Blutstroms spürbar sein. Eine länger andauernde vollständige Okklusion kann zu einer Thrombose und damit einem Verlust des Gefäßzugangs führen.

Bestellnummer: CLAMP-SP-02

Verpackungseinheit: 50 Bänder auf Rolle im Spenderkarton.

